

Brukerveiledning

Hepro Basic

Artikkel nr. [52140/52141]

Oversikt

Denne oversikten viser de viktigste delene. Komponentene som er illustrert kan være forskjellig fra din dusjstol. Hver gang stolen blir montert opp, vennligst se til at alle komponentene er monter korrekt og fungerer skikkelig.



1 – Skyvehåndtak

2 – Ryggstøtte

3 – Armlene

4 – Toalettlokk

5 – Toalettskål

6 – Legg støtte

7 – Fotplate

8 - Forhjul

9 - Brems hendel

10 – Avtakbart drivhjul

Merk: Pedalbrems er ikke vist i denne figuren.

Advarsel!

Komponentene vist i denne figuren trenger ikke å samsvare med din dusjstol. Alltid tilse at komponentene er sammensatt korrekt etter sammenstilling og justeringer gjort på dusjstolen.

Introduksjon

Kjære Hepro Basic bruker.

Gratulerer med din nye dusj- og toalettstol. Vi håper den vil gi deg økt frihet til å reise og til å besøke familie og venner.

Spesifikasjon

| Modell | Hepro Basic m/store hjul | Hepro Basic m/små hjul |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sete Bredde | 43cm | 43cm |
| Sete Dybde | 38cm | 38cm |
| Sete Høyde | 53cm | 53cm |
| Fotstøtte | 43cm | 43cm |
| Avstand mellom armlen | 46cm | 46cm |
| Armlene Høyde | 23cm | 23cm |
| Rygg Høyde | 46cm | 46cm |
| Lengde | 107cm | 89cm |
| Bredde | 63cm | 56cm |
| Høyde | 102cm | 99cm |
| Vekt | 16kg | 14kg |
| Brukervekt | 110kg | 110kg |

Sikkerhetsinformasjon

- Les denne brukerveiledningen før dusjstolen tas i bruk.
- Maks brukervekt 110kg.
- Alle komponenter må sjekkes for skader og sammenstilling før bruk.
- Kunne en person kan bruke denne om gangen.
- Brukes kun i korte intervaller.
- For din egen sikkerhet, sitt så lang bak på dusjstolen som mulig, slik at det er mindre sjanse for at den tipper forover.
- Unngå å bøye overkroppen til siden, forover eller bakover for å unngå at dusjstolen tipper.
- Bruk begge armlenene som støtte ved oppreisning.
- Unngå å bruke kun et armlene ved oppreisning, da dusjstolen kan tippe til en av sidene.
- Ikke stå på fotstøttene, de er bare ment til å støtte brukeren når personen sitter.
- Ikke støtt føttene på andre gjenstander, da stolen kan tippe bakover.
- Hold i selve rammen ved løft av dusjstolen.
- Ikke løft dusjstolen med bruker.
- Brukes kun på flatt underlag.
- Utøv forsiktighet i våte eller fuktige miljø da dette utgjør en fare for å skli.
- Beskytt dusjstolen mot uønsket bruk, da spesielt barn.
- Alltid lås av 2 hjul når den ikke er i bruk.
- Ikke bruk føttene til å bremse med, da det er fare for brudd.
- Aldri slipp dusjstolen fra en høyde.
- Aldri kast dusjstolen.
- Før bruk må fotstøttene være montert riktig.
- Hold god avstand fra trapper og andre hindre som kan skade brukeren eller dusjstolen.

Montering og bruk

- Montering trenger ikke verktøy.

Drivhjul



- Drivhjulene er ment for at brukeren kan skyve seg rundt med egen muskelkraft.
- Montering – Press inn knappen på navet til drivhjulet og plasser drivhjulet på akslingen. Se til at drivhjulet går i lås rundt akslingen.
- Demontering – Press inn knappen på navet til drivhjulet og dra drivhjulet av akslingen.
- Ved bruk av drivhjul må ikke eventuelle bremses på forhjulene brukes.

Fotstøttene



- Montering – Monter fotstøtten 90° til siden. Vri fotstøtten framover til den går i lås.
- Demontering – Dra i låsehendelen og vri fotstøtten 90° til siden og løft opp.
- Fotstøtten kan vris til siden for enklere tilgang for brukeren, husk å tilse at fotstøtten går i lås igjen når den vris tilbake.
- Fold opp fotplatene når brukeren skal inn eller ut av dusjstolen.
- Aldri løft dusjstolen etter fotstøttene.




Armlene



- Armlene kan løftes for enklere tilgang inn og ut av dusjstolen.
- Aldri løft dusjstolen etter armlenene.

Parkeringsbrems

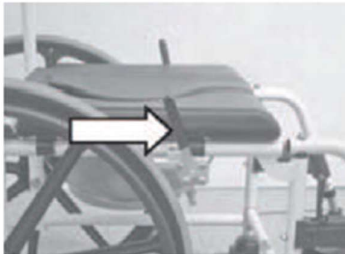

- Låsing – Dra bremsehåndtaket framover til drivhjulet går i lås, evt. trykk fotpedalen ned på trillehjulene til hjulene går i lås.
- Opplåsing - Dra bremsehåndtaket bakover til drivhjulet er fritt, evt. trykk fotpedalen opp på trillehjulene til hjulene er frie.

Toalettskål



- For rengjøring er toalettskålen avtakbar.
- Etter bruk, rengjør grundig og desinfiser dusjstolen og toalettskålen.
- Bruk bare kommersielle rengjøring- og desinfeksjonsmidler.
- Toalettskålen er ikke ment for maskinrens.
- Maksimal rengjøringstemperatur er 45°C

- Fjerning av toalettskålen – Løft litt på toalettskålen og dra den bakover.
- Innsetting av toalettskålen – Skyv toalettskålen inn under setet.

Vask og vedlikehold

- Vask med varmt vann, ikke over 45°C.
- Bruk vaskemiddel for ømfintlig stoff på armlenene og ryggstøtten
- Bruk bare kommersielle rengjøring- og desinfeksjonsmidler.
- Bruk svamp eller klut.
- Ikke bruk maskinelt rengjøring; høytrykkspyler eller oppvaskmaskin.
- Tilse at alle deler er tilstede.
- Tilse at bevegelige deler beveger seg fritt.
- Bytt deler som viser tydelig tegn på slitasje.

Garanti

Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot material og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets serienummer alltid oppgis som referanse.