

Hepro Elektro Kilo Arbeidsstol

For modell E1 Kilo 2020



NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk første gangen.

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12182
EN 1335-1, 2, 3
EN ISO 14971

EN 1021-1
EN 1021-2
EN 60601-1-2



Tilsiktet bruk

Elektro Kilo Arbeidsstol er konstruert og designet for store personer som trenger en arbeidsstol. Stolen har store hjul og god plass for beina slik at det er enkelt å forflytte seg på gulvet ved å "sparke" seg frem. Stolen har brems slik at den ved behov kan stå stødig på gulvet. Stolen kan enkelt reguleres slik at den passer til brukeren og gir god ergonomisk sittestilling.

Regulering av rygg

Ryggen kan reguleres opp og ned ved hjelp av ryggutløseren **A** bak på ryggen. Dra den ut for å løsne ryggen, flytt ryggen til ønsket posisjon og la utløseren gli inn i sporet igjen.



Regulering armlene

Armlenene reguleres opp og ned ved hjelp av bryteren på siden av armlenet. Når bryteren løftes opp løsner armlenet og den kan flyttes fritt, armlenet låses når bryteren er nede igjen.

Armlenepadsene kan reguleres frem og tilbake. Dette gjøres ved å dra i armlenetoppen.



Stolens armlener kan enkelt felles bak ved å trykke inn knappen på undersiden av armlenet.

Regulering av sitteenheten


- Den røde bryteren regulerer sittehøyden, opp ved å skryve bryteren bakover, og ned ved å skyve den forover.
- Lading av batteriene skjer ved å plugge ladepluggen inn i ladekontakten ved siden av den røde bryteren. Må lades før den tas i bruk.
- Spaken i bildet under brukes til å regulere ryggvinkelen. Løft opp for å løsne ryggen, løft ned for å låse den.



Regulering av bremsespaken

For å kunne regulere bremsespaken i bredden åpnes unbrako-skruen **B** på bremseadapteret og spaken kan flyttes

- Hvis bremsespaken ønskes fjernet, løftes den rett opp.
- Bremsen aktiveres ved å skyve bremsespaken forover.

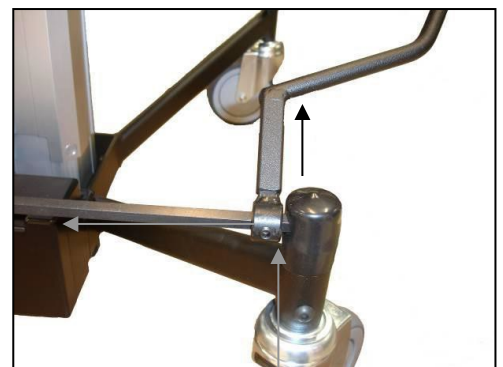

B

Rengjøring

Trekkene kan vaskes på 60 °C, eventuelt rengjøres med skumrens.

Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

Garanti

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll.

Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil.

Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

Sikkerhet

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 230 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.

ADVARSEL

- Ikke stå på fotringen, stolen kan velte!
- Selv om trekk og polstring er motstandsdyktig mot antennelse må det vises forsiktighet ved bruk av åpen flamme nær produktet, for eksempel ved røyking.