

## Hepro Aktiv arbeidsstol

For modellene G1- og G2 Aktiv



**Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!**

**Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:**

**EN 12182**

**EN 1021 – 1**

**EN 1335-1, 2, 3**

**EN 1021 – 2**

**EN ISO 14971**



### Tilsiktet bruk

Hepro Aktiv arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har problemer med å stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Stolen har store spaker med tydelige symboler og kan enkelt justeres slik at den passer ergonomisk mens den samtidig tar hensyn til kroppens bevegelser. Den gir god plass til beina og triller lett, men står stødig når bremsen er aktivert.

### Montering og regulering av ryggen

Ryggen er ikke montert når stolen leveres. Den monteres ved å trykke den forsiktig ned over ryggstolpen mens man samtidig holder inne reguleringsknappen på høyre side. Trykk ryggen helt ned. Etterpå brukes samme knapp for å løsne og regulere til ønsket høyde.



### Regulering av armlener

Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake.

Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige kappen og flytte armlenet dit det passer for deg.

Hele armlenet kan vippes bort ved å trykke opp plasthendelen helt nederst.

### Reguleringer


Ved å løfte spake **1** utløses gassfjæra og stolen kan heves eller senkes.

Spake **2** åpner seteglideren og setet kan flyttes frem eller tilbake

Spake **3** har to funksjoner. Vri bakover og stolens ryggvinkel kan endres. Vri fremover 90° og både sete og ryggvinkel er frikoblet og innstiller seg etter kroppen.


For modeller med seterotasjon vris spake **4** for å åpne rotasjonen. Vri rattet slik pila viser; mot O. Det trenges mindre håndkraft dersom du «vriker» litt på setet når du åpner. Den låser selv på hver 90°.

Hjulbremsen låses ved å skyve bremsehendelen framover. Da låses både rotasjon og sving slik at stolen står helt i ro.

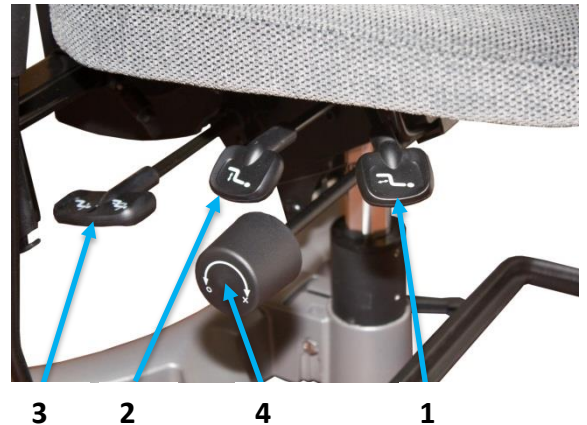

### Regulering av bremsespaken


Bremsespaken kan flyttes sidevegs ved å løsne de to unbrakoskruene(**1**) som holder spaken. Spaken kan også flyttes til andre siden. Posisjonen låses ved å stramme skruene. Bruk 2,5 mm unbrakonøkkel som leveres med stolen. (Den henger på høyre side i senter av hjulkrysset)

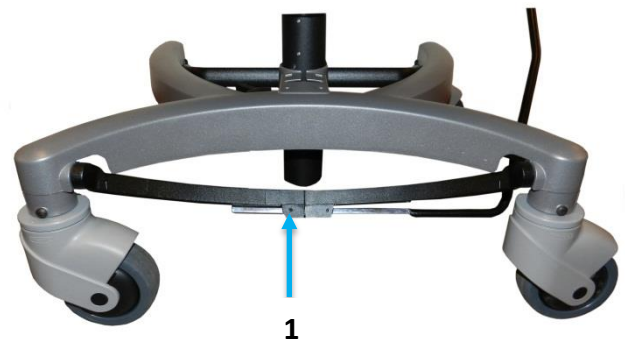

### Endring av setehøyde

Utover reguleringen med gassfjær eller aktuator, kan sittehøyden justeres ved å justere innfestingspunktet for sentralenheten. Justering gjøres slik:

- Stolen legges bakover.
- Låsespaken (B) løsnes - (skrus moturs).
- Sentralenheten er nå løs og kan heves eller senkes til ønsket posisjon.
- Sjekk at sitteenheten er rett i forhold til hjulkrysset.
- Trekk låsespaken (B) godt til

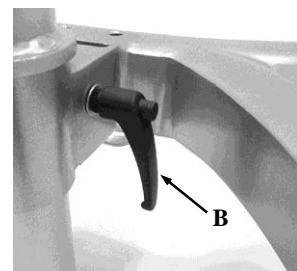

### Rengjøring

Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

### Garanti

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll

Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer alltid oppgis som referanse.



### Sikkerhet

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.

Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte!

Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk av åpen ild nær stolen.