

Hepro Standard og Coxit arbeidsstol

For modellene G- og E- Standard og Coxit



NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12182

EN 1335-1, 2, 3

EN ISO 14971

EN 1021 – 1

EN 1021 – 2

EN 60601-1-2

CE

Tilsiktet bruk

Hepro Standard og coxit arbeidsstol er laget for å være til hjelp for personer som har problemer med å stå eller flytte seg til og fra arbeidsplassen. Stolen har store spaker med tydelige symboler og kan enkelt justeres slik at den passer ergonomisk. Alle spakene er plassert på høyre side, foruten spaken for seterotasjon som er på venstre side. Stolen gir god plass til beina og triller lett, men står stødig når bremsen er aktivert.

Montering / regulering rygg

Ryggen monteres ved at den settes forsiktig ned på ryggstolpen til den stopper. Låsmekanismen for høyde-reguleringen **A** klemmes inn sideveis og holdes inne mens ryggen skyves ned til ønsket posisjon.



Regulering av armlener

Armleneputen kan enkelt skyves frem eller tilbake. Høyden reguleres ved å holde oppe den utvendige kappen og flytte armlenet dit det passer for deg. Hele armlenet kan vippes bort ved å trykke opp plasthendelen helt nederst.



Regulering coxit-klaffene

Gjelder bare **COXIT**-modellene.

- Åpne rattene **K** (venstre eller høyre), still inn coxit-klaffene i ønsket vinkel og lås rattene igjen.




K

Regulering av sitteenheten

For modeller med gassløft - G

- Spaken **F** løftes og sitteøyden reguleres til ønsket posisjon.
- Ratt **G** vrir og setevinkelen reguleres til ønsket posisjon.
- Spaken **H** løftes og ryggvinkelen reguleres til ønsket vinkel.

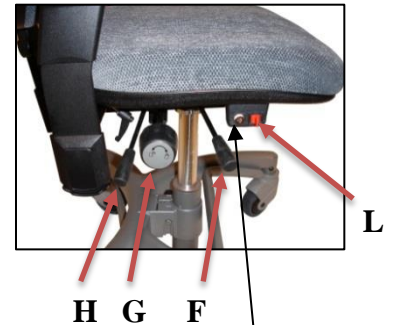


For modeller med elektrisk løft – E

- Den røde bryteren **L** regulerer sitteøyden, opp ved å skyve bryteren forover og ned ved å skyve den bakover.
- Ratt **G** og spake **H** fungerer som for modellene med gassløft
- Lading av **ELEKTRO**-modellene skjer ved å plugge ladepluggen inn i ladekontakten **M**. Det anbefales at stolen lades før den tas i bruk.

Betjening av seterotasjon


Gjelder modeller med seterotasjon!

- **I** løftes og seterotasjonen kan reguleres til ønsket posisjon.
- Setet kan låses i 4 posisjoner (for hver 90-ende grad). For modeller med elektrisk løft, bare i 3 posisjoner.

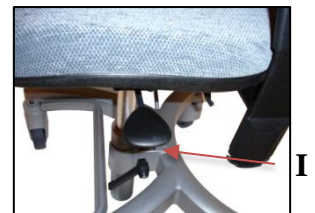

Regulering av bremsespaken

Bremsespaken kan flyttes sidevegs ved å løsne de to unbracoskruene **O** som holder spaken. Spaken kan også flyttes til andre siden. Posisjonen låses ved å stramme skruene. Bruk 2,5 mm unbraconøkkel som leveres med stolen. (Den henger på høyre side i senter av hjulkrysset).

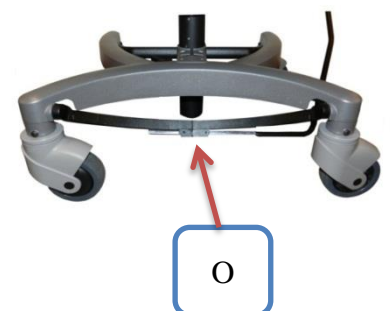

Stolen leveres med bremsespaken regulert helt inn

Rengjøring

Trekket kan vaskes på 60 °C, eller rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell rengjøres med fuktig klut og mildt såpevann.

Garanti

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll.

Dersom stolen er brukt i samsvar med bruksanvisningen yter Hepro 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet skal produktets serienummer alltid oppgis som referanse.

Sikkerhet

- Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn. Største tillatte brukervekt er 150 kg. Overskridelse av denne kan føre til skade både på bruker og produkt.
- Ikke stå på fotringen! Stolen kan velte!
- Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, må det vises forsiktighet ved bruk av åpen ild nær stolen