

Hepto Ståstoler

For modellene S1 til S10



NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk

Stolen er testet og godkjent i henhold til følgende krav:

EN 12182

EN 1335-1, 2, 3

EN ISO 14971

EN 1021 – 1

EN 1021-2



Montering

UTPAKKING

Stolene leveres umontert. Unntatt S2 som er ferdig montert

MONTERING

- Sett hjulkrysset på gulvet og slipp gassfjæren ned i senterhullet.
 - Trykk setet ned på gassfjæren.
 - Hvis modellen har rygg eller bryststøtte, monter denne.
 - Ryggen settes forsiktig ned på ryggstolpen
 - Ryggens låsemekanisme for høydergulering klemmes inn.
 - Med reguleringsknappen inne skyves ryggen i nederste posisjon.
 - Ryggen er nå korrekt montert.
 - Ved betjening av reguleringsknappen kan ryggen innstilles til ønsket høyde.
- Hjulkrysset monteres ved å sette det på gulvet med hjulene ned, for deretter å stikke gassfjæren med sitteenheten ned i senterhullet på krysset. For å være sikker på at det sitter fast, trykker man sitteenheten godt ned.

MONTERING/JUSTERING AV BREMSEPAKE PÅ MODELL S 2.


Stolene leveres med bremsespaken montert, men må reguleres til riktig bredde. Dette gjøres ved å åpne låseklemmen på bremsebøylen, trekke bremsespaken ut til rett posisjon og låse låseklemmen. Spaken kan også flyttes til andre siden



Regulering

Modellene S3, S8 og S9

- Rygghøyde: - Låseknappen 1 trykkes inn, og ryggen kan reguleres.
- Ryggvinkel og setetilt: - Spaken 2 vris mot ryggen for å åpne låsingene av rygg- og setevinkel. Spaken vris tilbake for å låse i innstilt posisjon.
- Sittehøyde: Spaken 3 løftes for regulering. Posisjonen låses når spaken slippes.
- Brystvinkel og setetilt: - Spaken 4 vris mot bryststøtten for å åpne låsingene av bryststøtte- og setevinkel. Spaken vris tilbake for å låse i innstilt posisjon.
- Belastningsbremsen: Hjulene låser når en setter seg, og er fri når en reiser seg.

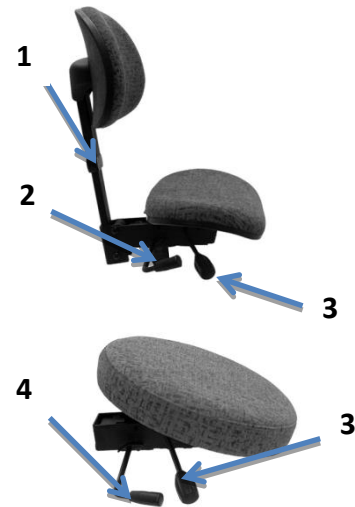

Modellene S1, S2, S6 og S10

Regulering av sitteenheten gjøres med følgende betjeningshendler:

- Rygghøyde: Låsebøylen (1) trykkes inn, og ryggen reguleres til ønsket høydeposisjon. Mothake sikrer at ryggen ikke ufrivillig kan løftes helt av.
- Ryggvinkel: Spaken (2) vris bakover for å åpne låsingene, og vris fremover for å låse i innstilt posisjon.
- Setetilt: Spaken (3) vris bakover for å åpne låsingene, og vris fremover for å låse i innstilt posisjon.
- Sittehøyde: Spaken (4) løftes for regulering. Posisjonen låses når spaken slippes.
- Sentralbremsen på S2: Spaken føres fremover og bakhjulene låser både for rulling og rotasjon. Bremsen frigjøres når bremsespaken skyves bakover.



Henvendelse ved feil

Dersom det oppstår feil eller problemer, som du ikke finner ut av selv, skal du henvende deg til den Hjelpemiddelsentralen som har formidlet produktet. Ved henvendelse, oppgi alltid serienummeret som er festet på stolens setekryss. For produkter som ikke er formidlet av Hjelpemiddelsentralen kontaktes Hepro serviceorganisasjon.

Rengjøring

Stoffet kan vaskes med våt klut eventuelt rengjøres med skumrens. Alle deler på ramme og understell kan rengjøres og støvtørkes med fuktig klut og mild såpe.

Informasjon om type og modell

Bruerveiledningen dekker følgende typer og modeller:

Hepro	HMS	
Art. nr.	Art.nr.	Modeller med 3 Betjeningshendler
30100	014233	S 1. Glideknott, fri rotasjon.
30101	019261	S 2. Hjul Ø100, sentralbrems, låst rotasjon.
30104	027538	S 6. Hjul Ø50, belastningsbrems, låst rotasjon.
30108	027258	S 10. Hjul Ø50, belastningsbrems, fri rotasjon.
		Modeller med 2 Betjeningshendler
30102	019262	S 3. Hjul Ø50, belastningsbrems, fri rotasjon.
30106		S 8. Hjul Ø50, belastningsbrems uten rygg, låst rotasjon
30107	145422	S 9. Hjul Ø50, uten brems, bryststøtte, fri rotasjon

Sikkerhetsbestemmelser

- Stolen er et hjelpemiddel, og skal ikke anvendes som "leketøy" for barn!
- Overskridelse av godkjent bruker vekt (120 kg) kan føre til skade både på bruker og produkt!
- Om du merker at produktet ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll!
- Belastningsbremsen virker på alle hjulene når en setter seg, og løser ut når en reiser seg. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med denne funksjonen før en begynner å bruke produktet!
- På modeller med fot støtte: Ikke stå på den, stolen kan velte!
- Selv om trekket er flammehemmende skal det ikke utsettes for åpen ild!